

KIT DE DÉMARRAGE

FLEXI TUBER 2 EN 1 (ANT20A)



Le Flexi Tuber propose deux méthodes d'alimentation des veaux :

- Placez la sangle derrière les oreilles du veau pour fixer l'embout buccal pour un fonctionnement mains libres.

OU


- Maintenez l'embout buccal en place d'une main, comme pour le Trusti Tuber.

Utilisez la sangle pour fixer l'embout buccal autour de la tête du veau.



Lors de l'utilisation de la sangle : avant de passer le tube, placez la sangle derrière les oreilles

+ tirez la languette pour qu'elle s'adapte confortablement.

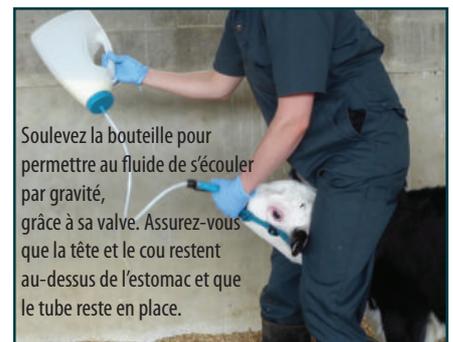

- Tube flexible et transparent.
- Embout de sécurité pour avaler facilement.
- Facile à nettoyer.
- Flux rapide, même avec du colostrum épais.
- Marquages de poids du veau

IMPORTANT

Il ne devrait jamais y avoir de résistance lors du passage du tube. En cas de résistance : ARRÊTEZ, retirez le tube, détendez la tête du veau, visez légèrement à gauche puis réintroduisez doucement.




ACCESSOIRES :



Kinder
Easier
Safer
Faster

KIT DE DÉMARRAGE FLEXI TUBER 2 EN 1 (ANT20A)

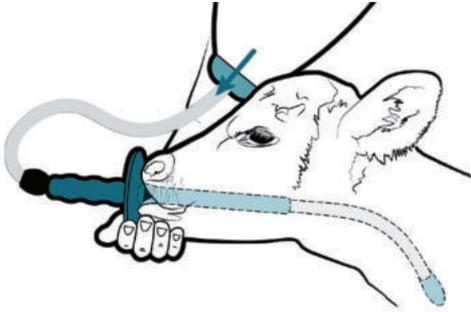

Avec une réduction de 88% du stress et de l'inconfort des veaux (par rapport aux drenchers rigides), Trusti et Flexi Tuber vous permettent d'alimenter vos veaux en tube en toute facilité et tranquillité.

La combinaison de l'embout buccal et du tube flexible rend l'alimentation plus facile, plus sûre et plus rapide.

Comme le prouvent les essais en ferme, ce nouveau procédé permet un gain en efficacité de drenchage pour l'éleveur et une meilleure expérience pour le veau.



BAGUE DE BLOCAGE ET INDICATION DU POIDS DU VEAU :

- Considérez les marquages de poids du veau comme des longueurs **MINIMALES** à atteindre pour l'introduction du tube flexible.
- La bague de blocage doit être positionnée à **DROITE** du marquage souhaité.



Ne sous-estimez pas le poids du veau car il vaut mieux introduire le tube plus loin que pas assez. Si vous nourrissez un groupe de veaux, nous vous recommandons de définir la position du bouchon au plus grand veau du groupe.



IMPORTANT

Ne jamais laisser s'écouler le liquide avant que le tube ne soit placé totalement dans l'œsophage.

ACCESSOIRES :

