



TRUSTI TUBER®

CAPRI Élu Capr'1 D'OR d'Or 2018

Dairy
Spares

Agneaux & Chevreaux

Le drencher facile à utiliser d'une seule main

**Facile
Sûr et
Rapide**



ANT30A



Étape 1 - Introduire le tube souple



Étape 2 - Le maintenir en position



Étape 3 - Soulever le flacon

COMMENT L'UTILISER :

- Introduisez délicatement le tube souple suffisamment profondément dans l'œsophage de l'animal.
- Soulevez le flacon. Assurez-vous que la tête et le cou restent toujours au-dessus du niveau de l'estomac et que le tube reste en position.

Conseils pour une utilisation sûre

Tenez le flacon en positionnant votre majeur au-dessus de l'accroche-tube et vos deux doigts dans la poignée en dessous. De cette façon, vous pourrez facilement tenir le flacon tout en guidant le tube avec le pouce et l'index. Avec un flacon pré-rempli, cela rend l'opération réalisable seul !

Pour s'assurer que le tube reste en position pendant que le liquide s'écoule, maintenez le tube avec la

même main que celle qui tient la tête de l'animal.

Assurez-vous que la tête et le cou de l'agneau ou du chevreau restent bien au-dessus de l'estomac.

Les rainures du marquage de sécurité vous permettent de voir si vous avez introduit suffisamment de tube flexible au-delà de l'entrée des voies respiratoires pour un agneau ou un cabri de moins de 6 kg. Lorsque les repères ne sont plus visibles à l'extérieur de la gueule de l'animal, c'est que vous êtes arrivés assez loin. Mieux vaut introduire le tube flexible un peu plus loin que pas assez.

Vous pouvez vérifier la position du tube dans l'œsophage en regardant la gorge sur le côté gauche du cou de l'animal. L'œsophage est un conduit suffisamment souple et affaissé pour permettre de voir l'embout du tube bouger.

www.dairyspares.com


Lors de la pose ou du remplissage du flacon, utilisez l'accroche-tube (au niveau de la poignée) pour conserver le tube propre et au-dessus du niveau de liquide.

Par temps très froid, pensez à réchauffer le tube entre vos mains pour l'assouplir avant utilisation. Introduisez puis enfoncez toujours le tube délicatement.

Pour arrêter l'écoulement en cours de drenchage, abaissez simplement le flacon.

Attendez que tout le liquide se soit écoulé avant de retirer doucement le tube.

Nous vous recommandons de laver votre drencher Trusti Tuber Agneaux / Chevreaux rapidement après usage, avec un détergent doux et de l'eau tiède. Ne pas plonger dans des produits acides.

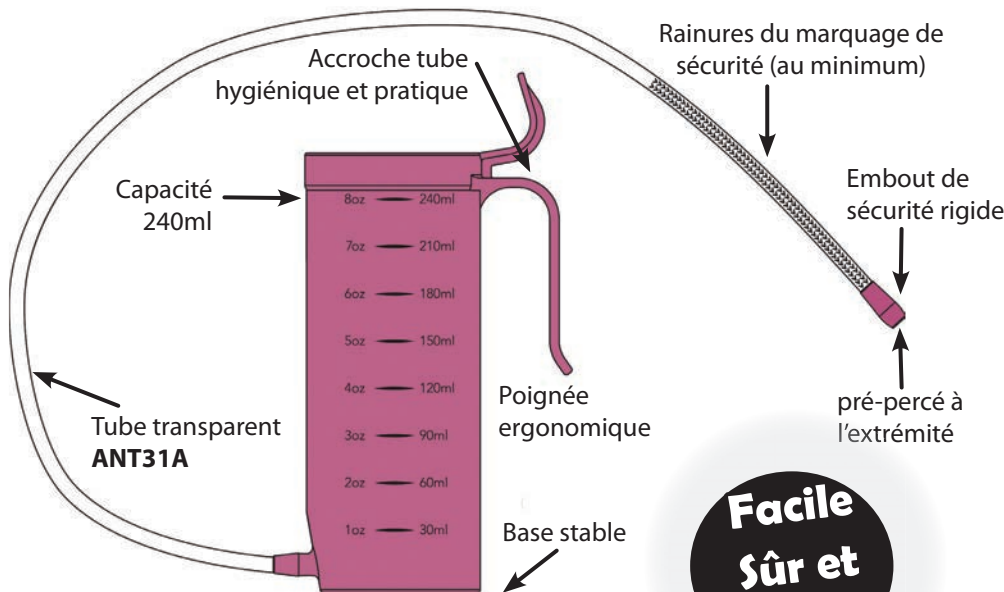

**Facile
Sûr et
Rapide**

AVANTAGES

- Utilisable d'une seule main.
- Conception et matériaux optimisés pour un nettoyage facile.
- Remplissable directement du lait de la brebis ou de la chèvre.
- Nettoyage facile du tube. Pas d'amas dans l'embout.
- Fonctionne par gravité, pas de pression.

Conseils de la SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires) :

- Administrer un colostrum de qualité (70-100 g/l IgG) dans les 12 premières heures de vie car son absorption va décroître de 100 à 60% au fil des jours.
- Viser 10% du poids vif de l'animal en plusieurs apports.
- Ne pas dépasser 200 ml en une fois afin de ne pas risquer un état de réplétion (remplissage) de la caillette pouvant conduire à une paralysie de l'organe.

Le Trusti Tuber® Agneaux - Chevreaux est également idéal pour administrer des compléments ou médicaments aux jeunes animaux.

Produits associés



MB63A
Teat Separator

Produits complémentaires



Lien vidéo
ANT30A



CF19

Tél : +33 (0)2 99 53 62 30
Fax : +33 (0)2 99 50 87 35
Mail : commercial@dairyspares.fr
Site web : www.dairyspares.com